



Prueba de embarazo con Detección Temprana

Detecta el embarazo hasta 6 días
antes de lo habitual

Resultados rápidos

Altamente confiable y >99% de precisión

– Punta ancha

– Mango ergonómico

**DISPONIBLE PARA OPORTUNIDADES CON
FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL**

¡Ofrece a los clientes una opción de prueba económica y confiable!

20 años
EXPERIENCIA CON FLUJO LATERAL

Altamente confiable
Y PRECISO

Detección el embarazo

La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona glicoproteica producida por la placenta en desarrollo poco después de la concepción. Los niveles de hCG aumentarán durante el embarazo. Las concentraciones específicas de hCG pueden usarse para predecir diferentes etapas del embarazo.

Información general

La prueba de embarazo específica para detección temprana es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina. La prueba es lo bastante sensible para detectar el embarazo hasta 6 días antes de lo habitual.

- Detección: Gonadotropina coriónica humana
- Muestra: Orina

- Tiempo de la prueba: 1 - 3 minutos

- Vida útil: 24 meses
- Temp. de almacenamiento: 2 - 30 °C / 36 - 86°F

Características



● Punta absorbente ancha ● Interpretación de resultados con + o - ● Ventana de resultados protegida ● Agarre ergonómico con el pulgar

Procedimiento e interpretación de la prueba



Chorro de orina



0



Muestra recolectada

Método de chorro

Sostenga el dispositivo por el mango, con la punta absorbente dirigida hacia abajo directamente en el chorro de orina.


Mantenga la punta en el chorro de 5 a 10 segundos.

Método con muestra

Tome una muestra de su orina en un recipiente limpio y seco. Sostenga el dispositivo por el mango, con la punta absorbente dirigida hacia abajo y sumérjala en la muestra de orina.

Mantenga la punta sumergida de 5 a 10 segundos.

Un resultado de 'embarazada' puede verse desde que pase tan solo 1 minuto. Espere los 3 minutos completos para confirmar que el resultado es negativo.

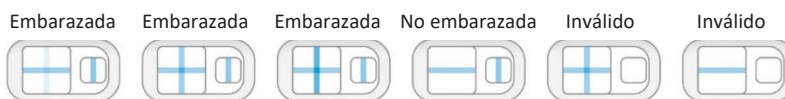

Información para pedidos

Autorizado para venta libre por la FDA

NOMBRE DEL PRODUCTO	CATÁLOGO	FORMATO	MUESTRA	PAQUETE
Prueba de embarazo con detección temprana	L031-20192	Chorro	Orina	2 pruebas/kit; 3 pruebas/kit



aconlabs.com

ACON Laboratories, Inc.
San Diego, CA 92121, U.S.A.
Tel: 1.858.875.8000
Fax: 1.858.200.0729
Correo electrónico: info@aconlabs.com