



## Influenza A/B Prueba Rápida de Antígenos


La Prueba Rápida de Influenza A/B es un inmunoensayo cromatográfico basado en método de membrana para la detección cualitativa y diferencial de los antígenos del virus de la Influenza tipo A y tipo B extraídos de muestras de hisopado nasal / de garganta / nasofaríngeo.



Rápida



Precisa

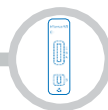

Fácil de usar



Con marca EC

# Prueba Rápida de Ag de Influenza A/B Flowflex

La Prueba Rápida de Influenza A/B es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa y diferencial de los antígenos del virus de la influenza tipo A, incluidos los subtipos conocidos actualmente, y tipo B de muestras de hisopado nasal / de garganta / nasofaríngeo directamente de personas que tienen la aparición de síntomas, como la aparición repentina de fiebre, tos (por lo general seca), dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, etc.

- Detección y diferenciación de tipo de la Influenza A y B en una única prueba
- Muestras de hisopado nasal / de garganta / nasofaríngeo
- Resultados en 15 minutos
- Excelente rendimiento en comparación con los métodos moleculares
- Almacenamiento a temperatura ambiente (2-30°C)
- Vida útil de 24 meses

## Rendimiento clínico

El rendimiento de la Prueba Rápida de Influenza A/B fue establecido con 256 hisopados nasales / de garganta / nasofaríngeos con resultado negativo y 113 hisopados con resultado positivo (incluidos 68 hisopados positivos para influenza A y 45 hisopados positivos para influenza B). El rendimiento de la Prueba Rápida de Influenza A/B Flowflex se comparó con el método RT-PCR.

### Rendimiento clínico para la Prueba Rápida de Influenza A/B

#### Los resultados para la influenza A:

Método	Resultados	RT-PCR		Resultados totales
		Negativo	Positivo	
Prueba Rápida de Influenza A/B	Negativo	254	0	254
	Positivo	2	68	70
Resultados totales		256	68	324

Sensibilidad relativa: 100.00% (93.60%-100.00%)\*

Especificidad relativa: 99.22% (97.01%-99.97%)\*

Precisión: 99.38% (97.63%-99.98%)\*

\*Intervalos de confianza del 95%

#### Los resultados para la influenza B:

Método	Resultados	RT-PCR		Resultados totales
		Negativo	Positivo	
Prueba Rápida de Influenza A/B	Negativo	255	0	255
	Positivo	1	45	46
Resultados totales		256	45	301


Sensibilidad relativa: 100.00% (90.62%-100.00%)\*

Especificidad relativa: 99.61% (97.59%-99.99%)\*

Precisión: 99.67% (97.95%-99.99%)\*

\*Intervalos de confianza del 95%

## Procedimiento de prueba e interpretación

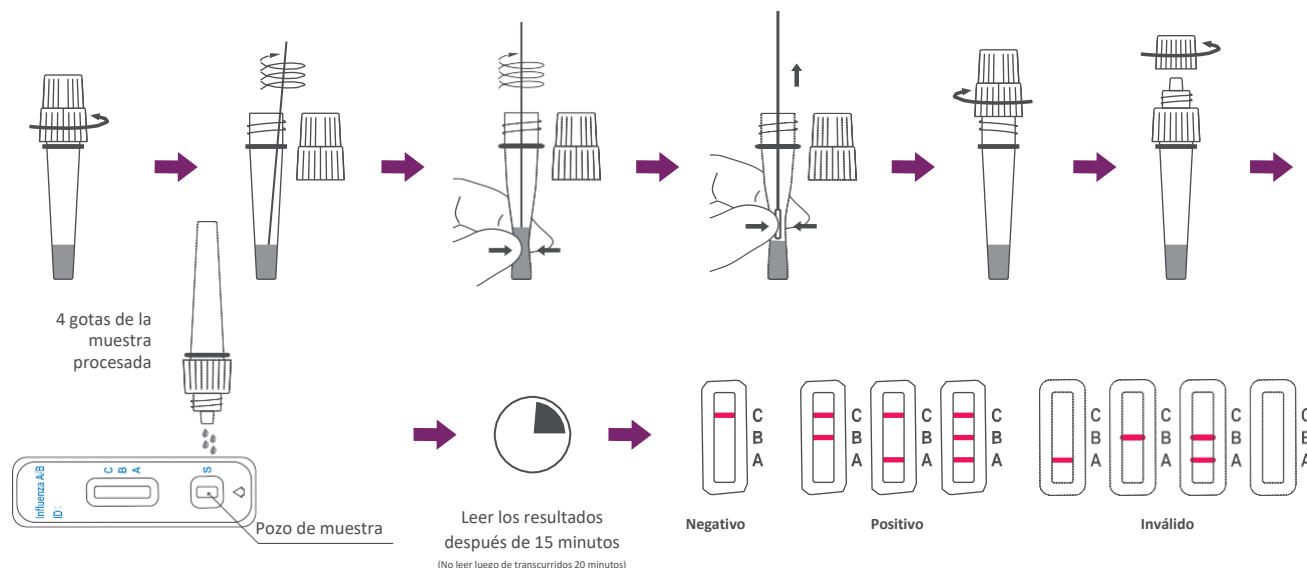

## Información de pedido

Nombre del producto	Nro. de Catálogo	Componentes	Muestras	Paquete
Prueba Rápida de Influenza A/B Flowflex	L031-11915	Cartuchos de prueba Tubos de tampón de extracción Hisopado de control positivo Hisopado de control negativo Hisopos descartables Folleto de empaque	Hisopado nasal / de garganta / nasofaríngeo*	25 pruebas/kit

\* Especificar el tipo de hisopo que se prefiere al realizar el pedido



aconlabs.com

**ACON Laboratories, Inc.**  
5850 Oberlin Drive, # 340  
San Diego, CA 92121, USA  
Tel: 1858875.8000  
Fax: 1858200.0729  
Correo electrónico: info@aconlabs.com